

Instrukcja techniczna

Taśma ochronna na dłonie

Taśma flexi

7695-50-45

Elastyczny, samoprzylepny bandaż ochronny, opracowany specjalnie do stosowania na palcach i opuszkach palców. Zapobiega wnikaniu wody i brudu oraz posiada ponadprzeciętną odporność na ścieranie.

Oderwij bandaż i delikatnie go owiń wokół obszaru, który ma być chroniony.

Wymiary: długość 4,50 m, szerokość 50 mm
samoprzylepny bandaż ochronny
idealny przy urazach dłoni i palców
odporny na wodę i materiał
rozciągliwy i rozdierany



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Po prawidłowej dezynfekcji zdejmij bandaż ochronny Medybee i delikatnie obróć nim wokół zranionego miejsca. W przypadku większych urazów należy używać jałowej gazy. W przypadku urazów opuszki palców, owiń produkt wokół palca tak, aby wystawało ok. 2 cm. Są one składane, a pozostały bandaż jest następnie owijany wokół palca.

W przypadku poważnych urazów, np. Ramienia lub nogi, po wstępnym leczeniu można zastosować produkt jako dodatkowe zabezpieczenie istniejących bandaży. Aplikacja umożliwi bezproblemowe zadbanie o higienę osobistą (mycie / prysznic). Produkt należy owinać co najmniej 3 razy wokół istniejącego bandaża, na zakładkę i mocno naprężając. (Ten bandaż ochronny może być używany kilka razy).